

KT Touch

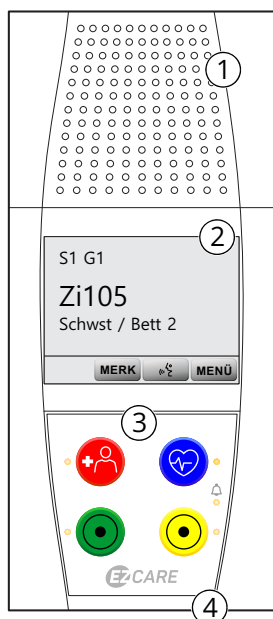


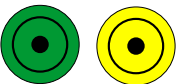



Abb. 1: KT Touch
1 – Lautsprecher
2 – Display (Touchscreen)
3 – Folientastatur
4 – Mikrofon

Diese Kurzbedienungsanleitung enthält nur die wichtigsten Informationen. Eine vollständige Beschreibung aller Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung von EZ CALL IP, EZ.950.8000D.

Folientasten

Taste	Bedeutung
	Ruftaste <ul style="list-style-type: none"> ■ Patientenruf auslösen. ■ Mit gesetzter Anwesenheit Notruf auslösen. ■ Beruhigungslampe an: Ruf ist ausgelöst.
	Herzalarmtaste <ul style="list-style-type: none"> ■ Konfigurierten Ruf auslösen. ■ Beruhigungslampe an: Ruf ist ausgelöst.
	Anwesenheitstaste 1/2 <ul style="list-style-type: none"> ■ Anwesenheit setzen oder löschen. ■ Mit der Anwesenheit auch KT Touch ein- oder ausschalten. ■ Mit der Anwesenheit auch Rufe, die an diesem KT Touch ausgelöst wurden, löschen. ■ LED an: Anwesenheit ist gesetzt.
	Ruf-LED Die LED zeigt neue Rufe, Störungen und Meldungen an.

Tab. 1: Folientasten und ihre Bedeutung

Tasten auf dem Display

Taste	Bedeutung
 	Abfragen <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn ein Ruf mit Sprechmöglichkeit angezeigt wird: Ruf abfragen. ■ Wenn Sie die Taste erneut tippen, so beenden Sie die aktuelle Sprechverbindung. Notrufe werden dabei automatisch gemerkt.
	Menü öffnen
	Ruf merken Beachten Sie: MERK. ist Liste der gemerkten Rufe

Tab. 2: Tasten auf dem Display und ihre Bedeutung